
センサーホルダー CCDセンサー用 平行法撮影補助製品

Kerr

スーパーバイト・エンドバイト・クイックバイト ご使用の手引き

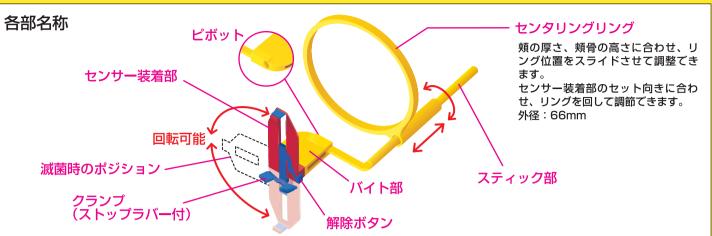

●上下左右共用デザイン

スーパーバイト及びエンドバイトは、 バイト部のピボットを中心にセンサー 装着部を回転する事ができます。 従って、1つで上下左右に対応します。





●平行法の撮影ポジション



- ●二等分法の センサー位置
- 2 平行法である本品の センサー位置

●滅菌方法

- ・センサー装着部を滅菌時のポジションにし、滅菌パウチに入れて下さい。
- ・オートクレーブ134℃で3分間、滅菌して下さい。
- ・高温(134℃以上)での乾燥は行わないで下さい。
- ・オートクレーブ後は、完全に冷めてからご使用下さい。

-般的な二等分法と異なり、平行法での撮影となります。 センサーは歯面から離れた状態で撮影します。

また、咬合が困難な場合、患者さんにホルダーを把持して頂き無理 に咬ませず、開口したまま撮影します。

▶センタリングリングの装着



●X 線コーンの合わせ方

コーンとスティック部が平行になる 様に合わせます。

リングの突起部をスティック部のスリットに合わせ、 センサー装着部の方へスライドさせます。

●センサー装着部の回転

スーパーバイト、エンドバイト共に上下左右共用です。 撮影部位に合わせ、センサー装着部を回転させます。その際、バイ ト部をしっかりと把持し、センサー装着部を回転させて下さい。 センサー装着部とセンタリングリングが同一線上に並ぶ様、リング を軽く回します。スティック部のスリットにより、センタリングリ ングは正しい位置で止まります。



●センタリングカードの使用

センタリングリングは直径6cmのコーン対応となっております。 それ以外のコーンはセンタリングカードをご使用下さい。



⑤ Envista エンビスタジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー TEL:0800-111-8600 FAX:03-6866-7273

スーパーバイトセンサー用:前歯用


涌営デンタル撮影用



●撮影ポジション



バイト部を撮影部位に合 わせます。極力、リング 寄りに合わせ、軽く咬ま せます。

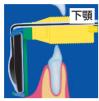

舌を挙上させ、バイト部 を撮影部位に合わせ、軽 く咬ませます。

●センサーの装着



解除ボタンを押してクラ ンプを開きます。



センサーを縦にクランプ に挟み、閉じます。



大き目のセンサーも同様 に装着出来ます。

スーパーバイトセンサー用: 臼歯用 通常デンタル撮影用



●撮影ポジション



バイト部を撮影部位に合 わせます。センサーを□ 蓋の高い位置にセットし、 咬ませます。



バイト部を撮影部位に合 わせ、軽く咬ませます。

●センサーの装着



解除ボタンを押してクラ ンプを開きます。



センサーを横にクランプ に挟み、閉じます。



大き目のセンサーも同様 に装着出来ます。

エンドバイト センサー用:前歯用

リーマー類確認撮影用



●撮影ポジション



上顎のポジション



下顎のポジション

●センサーの装着



CCDセンサーの装着方法 は、スーパーバイトと同

●セット



バイト部の中空部をリー マ一類に合わせて下さい。

エンドバイトセンサー用: 臼歯用

リーマー類確認撮影用



●撮影ポジション



上顎のポジション



下顎のポジション

●センサーの装着



CCDセンサーの装着方法 は、スーパーバイトと同

●セット



バイト部をリーマーの近心 部か遠心部にセットします。

各図の撮影ポジションを参考にバイトポジションを決めて下さい。

バイト部を撮影部位に合わせることにより、CCD センサーが歯軸と平行にセットされます。

上顎前歯部の撮影は、バイト部のリング寄りに撮影部位を合わせる事で、センサー装着部上部が口蓋の高い位置に誘導されます。 下顎前歯部の撮影は、必ず舌を挙上させ、撮影部位に合わせて下さい。

口蓋や口腔前庭が浅く、咬ませる事が難しい場合は、ホルダーのスティック部を把持して頂くか、バイト部を指で押さえて頂いて下さい。

●クイックバイトはバイトウイング (咬翼法)撮影用です。

クイックバイト センサー用

臼歯部の隣接面う蝕、歯槽骨頂部の骨形態などの経過診 断用バイトウイングの撮影位置を容易に規格化できます。



●センサーの装着



1.解除ボタンを押し のクランプを開きま



2.センサーをクラン プに挟み、閉じます。



3.装着完了。



4.位置を決め、撮影 を行います。



5.外す時は解除ボタ ンを押し、クランブ を開いて外します。