

状況に合わせたポリッシングペーストの選択

クリニック チューブ、プロカップ

Customer Information



神奈川県小池歯科医院
歯科衛生士

吉久保 典子 さん

私たち歯科衛生士にとって、使用しない日はないと言っても過言ではないポリッシングペーストですが、毎日使うものだから出来るだけシンプルに使用したいと考えます。そんな願いを叶えたのがカーのクリニック チューブです。

ポリッシングペーストは、粗研磨、仕上げ研磨、つや出しと段階別に分かれた製品がほとんどですが、クリニック チューブは1本で完了するオールインワンタイプです。これは、カーの技術である真珠岩粒子(パールライト)を配合し、使用経過ごとに粒子が細かく変化するためです。研磨開始からおおよそ15秒で仕上げ研磨に適した粒子に変化するので、2~3歯あたり15秒で仕上げるイメージで丁寧に行うと、全顎、6分ほどで研磨が完了します。

注意点として、発熱と飛散を防ぐため低回転(3,000回転/分以下)で使用します。高齢者など根面が露出している場合は、はじめにエナメル質から研磨を開始し、粒子が細くなった頃合いに根面を研磨します。RDAは27、REAは3.4と歯面に優しく安心です。

また、状況に合わせて成分やフレーバーを選択出来るラインナップになっています。フッ素入りは通常のクリーニングに適し、フレーバーは4種類から選べます。定期的なメンテナンスでは、すっきりと爽快感を味わっていただけるペパーミント。メンソールが苦手な方にはベリーやグリーンアップル。また、無味無着色のライトは、ペーストが無色なのでステインの落ち具合が確認しやすく、施術後に食事の予定などがある方には、味覚を阻害せずに済むという点でも活用出来ます。クリニックチューブにはフッ素非含有タイプもありますので、補綴物の装着前や、インプラントが入っている方にも安心して使用出来ます。

このようなクリニックチューブに適したラバーカップがプロカップです。特徴として、ペーストの飛散を防ぐウイングが広く、高さが低いので、頬粘膜などを大きく排除する必要がなく、最後臼歯遠心面でも楽に当てる事が出来ます。また、先端に向けてわずかに絞られた形状は、ペーストを逃しにくく歯面に確実に作用させることができます。カップの内面には複数の溝があり、臼歯部咬頭を包み込むように研磨するのも効果的です。側面にも螺旋状の溝が施されているので、歯列不正であってもプロカップの側面を当てることで研磨が可能です。

私たち歯科衛生士は、数あるアイテムの中から、そのときそのときの状況に合わせて何を使用するのが効果的かを判断し、パーソナルに対応することが求められます。そのためには、使用するアイテムがどのような特徴を持っているかを理解することが重要です。

忙しい毎日の診療の中、少しでもチェアタイムを短縮させたい。しかし、機能性と作用性は妥協したくない。そこで、オールインワンタイプで効率の良いクリニック チューブと操作性に優れた形状のプロカップを選びました。小さいアイテムですが、歯科衛生士には大きく役立つベストコンビだと思います。

臨床例



クリニックチューブのペーストは、歯面にしっかり作用する。



ペーストは柔らかすぎず、巻き上がってくるのがほとんどない。



歯列不正でもプロカップは側面での研磨が可能。



プロカップは高さが低いため、頬粘膜などを大きく排除する必要がなく、最後臼歯遠心面でも楽に当てることができる。



プロカップの先端は歯肉溝に適度に密着する。

クリニクチューブ

選べる5つのラインアップ

フルーティな
風味溢れるフレーバー



ベリー

品目コード	3386
伝票記載コード	0.808.2986
フレーバー	ベリー
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	4,200 円

クールなテイストの
スタンダードタイプ



ペパーミント

品目コード	3380
伝票記載コード	0.808.0990
フレーバー	ペパーミント
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	4,200 円

甘酸っぱく
爽やかなフレーバー



グリーンアップル

品目コード	3382
伝票記載コード	0.808.0992
フレーバー	グリーンアップル
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	4,200 円

セメンティングや
矯正ブラケット装着、
ホワイトニング前に



ペパーミント フッ素無し

品目コード	3183
伝票記載コード	0.808.2340
フレーバー	ペパーミント
フッ素 1,000ppm	非含有
標準価格 100g入	4,200 円

香料や顔料が苦手、
アレルギーが心配な
患者さんに



ライト

品目コード	3384
伝票記載コード	0.808.2341
フレーバー	無味無着色
フッ素 1,000ppm	含有
標準価格 100g入	4,200 円

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149103600

ご注文は、お取り扱い歯科ディーラー様までお願いいたします。



Webサイト



Envista エンビスタジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL:0800-111-8600 FAX:03-6866-7273

www.envistaco.jp

KKSAJB1904V4 KR-0142